

4.8 Nettoyage

4.8.1 Nettoyage de l'extérieur de l'appareil

Pour nettoyer le capot ou le panneau de l'appareil souillé, utiliser un chiffon sec et doux. Dans le cas de taches tenaces, les essuyer avec un linge imbibé d'un détergent neutre et les essorer à fond. Pour finir, les essuyer avec un linge sec et doux.



PRECAUTION • Ne jamais utiliser de solvant organique tel que du diluant pour peinture.

Vous risqueriez d'endommager la finition de l'appareil.

- Essuyer légèrement la surface extérieure de l'affichage.

Sinon, l'écran risque d'être rayé ou de mal fonctionner.

- Ne jamais utiliser d'éponge imbibée d'eau.


De l'eau risque de s'infiltrer à l'intérieur de l'appareil et de provoquer un dysfonctionnement.

4.8.2 Pour nettoyer le verre


Si un marqueur à tampon encreur est souvent utilisé, le verre situé au-dessus du support de verre peut se tacher.

Dans ce cas, nettoyer la lentille car cela peut être une source d'erreur de mesure.

- 1) Éliminer la poussière à l'aide d'une poire pneumatique.

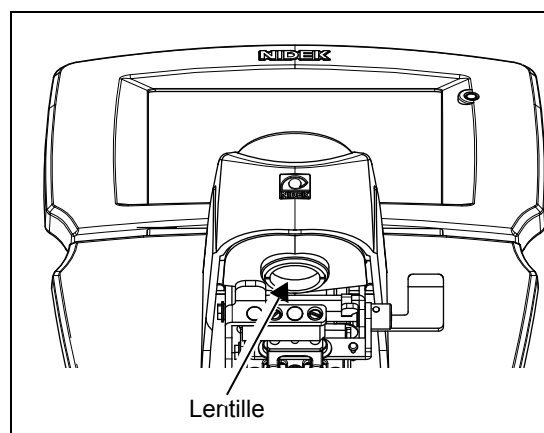

- 2) Envelopper un bâton fin de type bâtonnet (ou coton tige) avec du papier pour surface optique, l'humidifier d'alcool et essuyer la lentille.

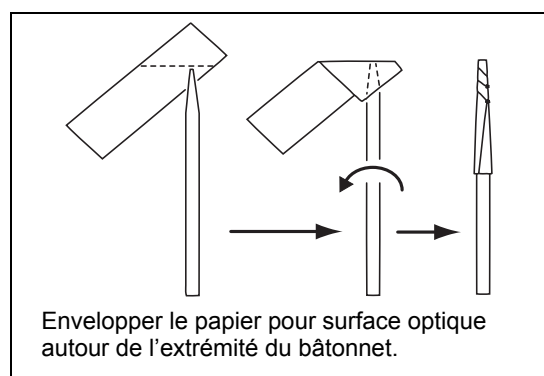

Remarque


- Utiliser un bâtonnet qui ne risque pas d'endommager le verre.
- Essuyer légèrement la lentille en décrivant des cercles du centre vers la périphérie.

4.8.3 Nettoyage de l'imprimante

Après une utilisation prolongée, la fente à papier du massicot automatique de l'imprimante est maculée de particules de papier. Pour ne pas provoquer de dysfonctionnement du massicot automatique, nettoyer l'imprimante.

- 1** Ouvrir le capot de l'imprimante et retirer le rouleau de papier d'imprimante.

Se reporter à « 4.4 Remplacement du papier d'impression » (Page 150).

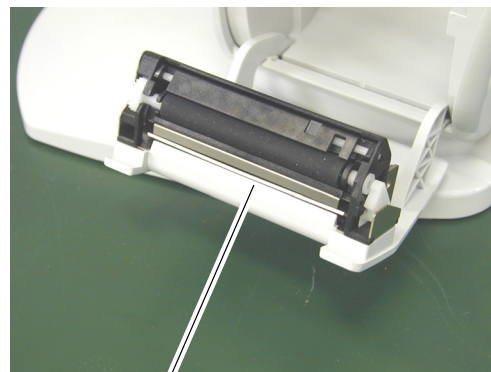

Massicot automatique

- 2** Passer la buse d'un aspirateur sur le massicot automatique pour éliminer les particules de papier.

Ne jamais disperser les particules de papier avec une poire. Si des particules de papier se sont accumulées sur la structure active interne, un dysfonctionnement risque de se produire.


- 3** Remettre le rouleau d'impression à sa place.

4.8.4 Nettoyage de la fente de chargement de carte Eye Care

Après une longue période d'utilisation, les contacts dans la fente de chargement de la carte Eye Care peuvent devenir sales. S'ils ne sont pas nettoyés, les données ne peuvent pas être lues ou gravées correctement.

En pareil cas, nettoyer les contacts avec un nettoyeur de contact pour lecteur/graveur de carte IC de type à contact.

Utilisez un produit nettoyant pour contact commercial ou un en option (numéro de pièce 80605-00023).

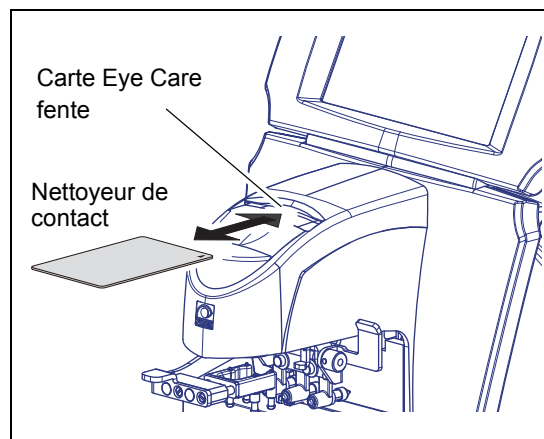

Lorsque les contacts de la carte Eye Care deviennent sales, les essuyer avec un chiffon doux. Dans le cas de taches tenaces, imbiber un linge d'un détergent neutre, l'essorer à fond et les nettoyer. Pour finir, les essuyer avec un linge sec et doux.



Remarque

- Ne pas oublier de couper l'alimentation du dispositif avant de faire le nettoyage du nettoyeur de contact.
- Pour utiliser le nettoyeur de contact, consulter le manuel fourni avec le produit nettoyant.
- Les contacts lecteur de carte Eye Care sont sur la surface inférieure. En procédant à plusieurs reprises, insérer le nettoyeur de contact avec la partie d'essuyage (surface munie de tissu) dirigée vers le bas et agir plusieurs fois pour nettoyer les contacts du lecteur.