

RT-3100, RT-5100, RT-6100

LES BONNES PRATIQUES DE NETTOYAGE

Dans ce contexte inédit de COVID-19, NIDEK SA recommande le nettoyage des équipements d'ophtalmologie et des espaces de travail **entre chaque patient**.

Pour cela, NIDEK SA souhaite vous rappeler les bonnes pratiques de nettoyage des équipements NIDEK selon les manuels d'utilisation du fabricant.


Selon celles-ci, pour l'élimination du coronavirus sur les dispositifs NIDEK distribués par NIDEK SA (produits non critiques au regard des règles d'hygiène et de désinfection), NIDEK SA recommande l'utilisation:

- D'alcool dénaturé avec une concentration d'au moins 70% (directives AAO *1)
- De lingettes désinfectantes prêtes à l'emploi, virucides et à base d'éthanol, et avec un temps de nettoyage relativement court selon les recommandations des fabricants de ce type de produit de nettoyage/désinfectant (se référer aux recommandations d'utilisation des sociétés des produits utilisés).

Il est nécessaire de veiller au respect des recommandations des comités et autorités scientifiques.

Une **attention particulière doit être portée sur le nettoyage des éléments en contact direct/indirect avec le patient examiné** (détaillé ci-dessous)

Positionnement patient et environnement opérateur :

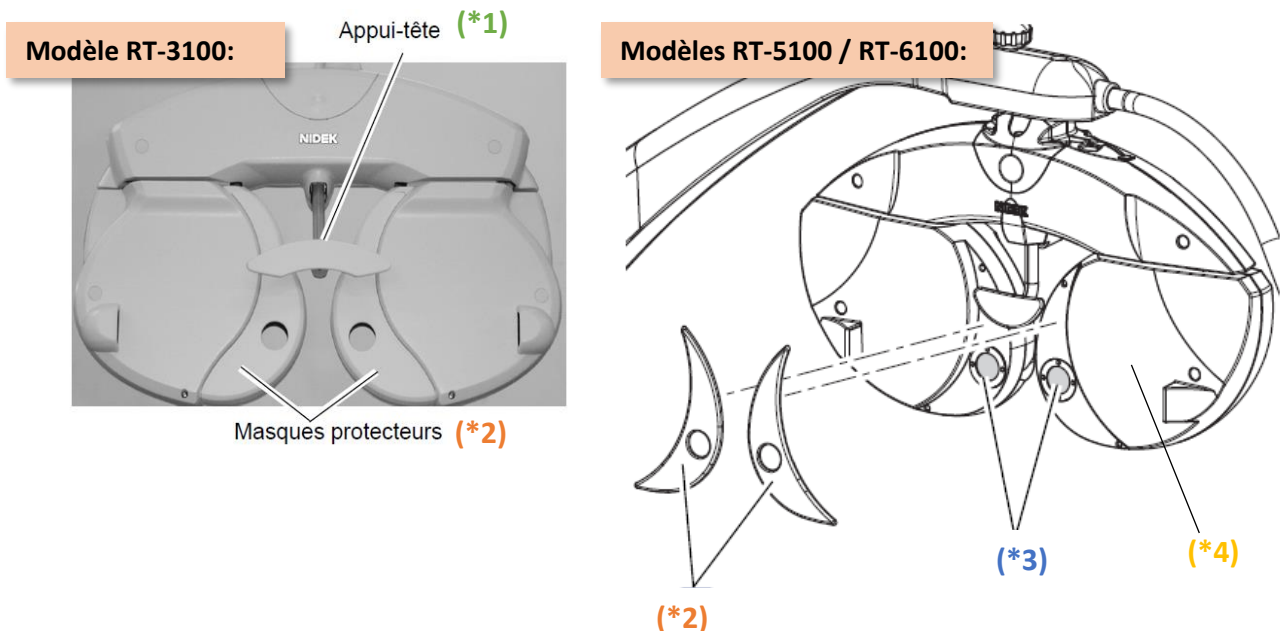

Entre chaque patient, NIDEK SA préconise de nettoyer **systématiquement** les zones en contact direct et indirect avec l'opérateur (écran et boutons de la console de contrôle) ainsi que les parties suivantes de la tête du réfracteur :

- (*1) – Appui-tête détachable
- (*2) – Masques protecteurs (appui-joues) détachables
- (*3) – Fenêtres de mesure
- (*4) – Surfaces extérieures de la tête du réfracteur


RT-3100, RT-5100, RT-6100

LES BONNES PRATIQUES DE NETTOYAGE



(*1) – Appui-tête détachable


Suivre la même procédure pour les modèles RT-3100, RT5100 et RT-6100.

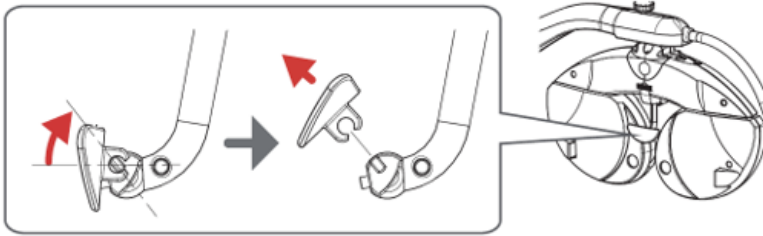

1. Incliner l'appui-tête vers le haut
2. Le tirer vers soi pour le retirer
3. Nettoyer en se servant de gaze propre ou d'un tampon de coton imprégné d'alcool dénaturé ou de lingettes désinfectantes prêtes à l'emploi
4. Sécher à l'aide d'un linge sec et doux à usage unique
5. Incliner l'appui-tête pour le remettre en place

(*2) – Masques protecteurs (appui-joues) détachables

Suivre la même procédure pour les modèles RT-3100, RT5100 et RT-6100.

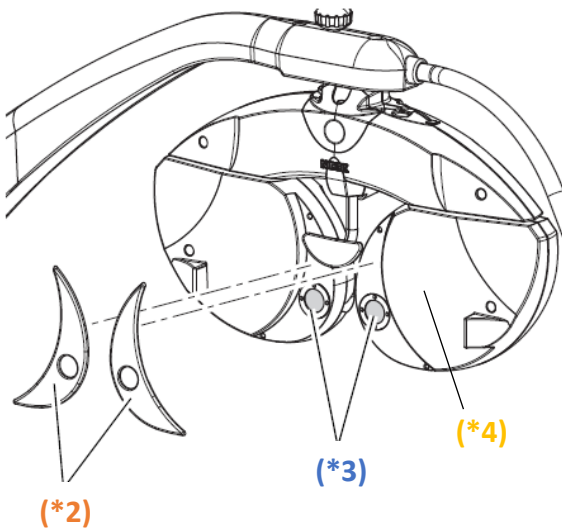

1. Retirer les masques protecteurs (ils sont magnétiquement fixés contre la tête du réfracteur)
2. Nettoyer en se servant de gaze propre ou d'un tampon de coton imprégné d'alcool dénaturé ou de lingettes désinfectantes prêtes à l'emploi.
3. Sécher à l'aide d'un linge sec et doux à usage unique (*attention, la surface interne aimantée doit rester sèche et non humide afin de ne pas rouiller*)
4. Remettre les masques protecteurs en place

(*3) – Fenêtres de mesure

Suivre la même procédure pour les modèles RT-3100, RT5100 et RT-6100.

1. Lorsque les masques protecteurs sont retirés, nettoyer en essuyant délicatement avec un chiffon souple qui ne rayera pas le verre de protection des fenêtres de mesure. **Au vue de la situation actuelle inédite et au risque d'entraîner une usure prématurée du traitement de surface de la fenêtre**, NIDEK SA recommande de nettoyer également ces surfaces à l'aide de gaze propre / tampon de coton imprégné d'alcool dénaturé ou de lingettes désinfectantes prêtes à l'emploi. La surface des fenêtres des mesures peut être endommagée par un nettoyant/désinfectant utilisé trop fréquemment. NIDEK SA recommande donc de prévoir un changement plus régulier de ces fenêtres.
2. Sécher à l'aide d'un linge sec et doux à usage unique afin de garder ces fenêtres claires
3. Remettre les masques protecteurs en place

(*4) – Surfaces extérieures de la tête du réfracteur

Suivre la même procédure pour les modèles RT-3100, RT5100 et RT-6100

1. Nettoyer en se servant de gaze propre ou d'un tampon de coton imprégné d'alcool dénaturé ou de lingettes désinfectantes prêtes à l'emploi
2. Sécher à l'aide d'un linge sec et doux à usage unique