

Guide d'utilisation simplifié : LM-7 / LM-7P


Pour toutes informations complémentaires, toujours se référer au mode d'emploi.

MISE EN MARCHÉ

- 1- Basculer l'interrupteur M/A sur 
- 2- Attendre la fin de l'initialisation




Affichage type 1

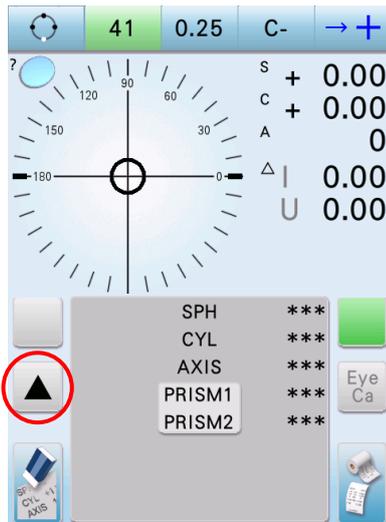

- Le bouton  permet de passer de l’Affichage Type 1 à l’Affichage Type 2
- Le bouton  permet de passer de l’Affichage Type 2 à l’Affichage Type 1
- Pour des raisons de simplification, tout ce guide utilisera des illustrations l’Affichage Type 1

Affichage type 2

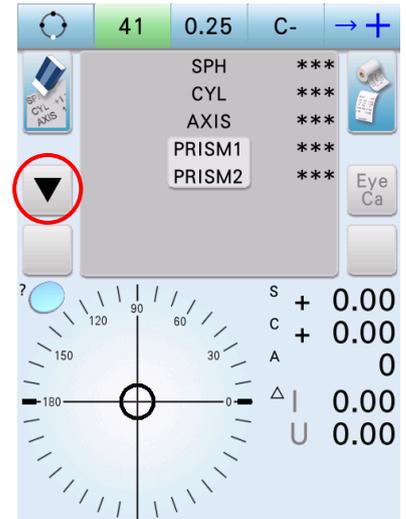

Bouton menu

Choix du type de verre :

-  Détection automatique
-  Verre Simple Foyer
-  Verre Progressif
-  Lentilles de contact


Mire de mesure

Bouton de remise à zéro : efface les dernières mesures

Pas de mesure : Possibilités 0.25, 0.12, 0.06 et 0.01 dioptrie.

Nombre d'Abbe

Changement de signe du cylindre

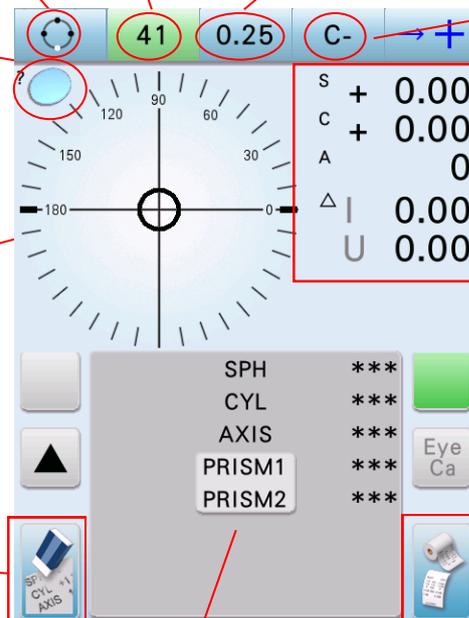

S	Sphère
C	Cylindre
A	Axe
Δ	Prisme

Valeur des Mesures en cours

Bouton Impression

Fenêtre de résultats

Affichage des Prismes

Δ I	0.00	Affichage Prisme en Coordonnées Rectangulaires
U	0.00	
Δ	0.00	Affichage Prisme en Coor- données Polaires
	0	


Prisme Base Externe (Out)	O
Prisme Base Interne (In)	I
Prisme Base Inférieure (Down)	D
Prisme Base Supérieure (Up)	U

Autres fonctions

Une pression prolongée sur la mire centrale ouvre la fenêtre ci-dessous

Choix du type de verre :

-  Détection automatique
-  Verre Simple Foyer
-  Verre Progressif
-  Lentilles de contact

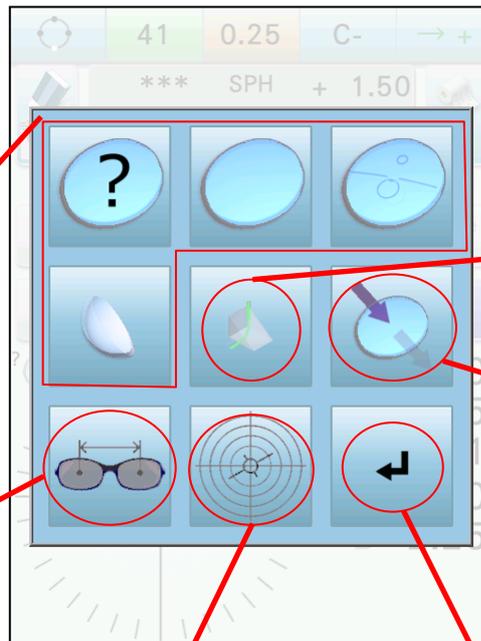

Menu Prismes : Permet l'insertion de prismes par décentration

Accès à l'écran de mesure de la transmission UV. L'accès à cet écran peut également se faire par pression prolongée sur le bouton Mesure .

Accès à l'écran de mesure des écarts pupillaires

Accès à la mire graduée de mesure des prismes

Retour à l'écran de mesure