

# Pupitre Syntetic pour configuration MEDADOM

## Guide d'utilisation simplifié

Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous d'avoir lu le manuel d'utilisation Syntetic afin de bien comprendre les mesures de sécurité et les procédures opérationnelles.

**Important:**


Seules les opérations fonctionnelles pour l'activité MEDADOM figurent sur ce document. Les autres boutons ne sont pas fonctionnels. Pour toutes informations complémentaires, toujours se référer au manuel d'utilisation.

**Bouton d'arrêt d'urgence**

Bloque tous les mouvements de l'unité.

Si le bouton est activé, tirez dessus pour débloquer les mouvements. Et appuyez sur le bouton « Marche / Arrêt » pour allumer à nouveau toute la configuration.

**Marche / Arrêt**  
(Allume / éteint la table Syntetic + tous les appareils)

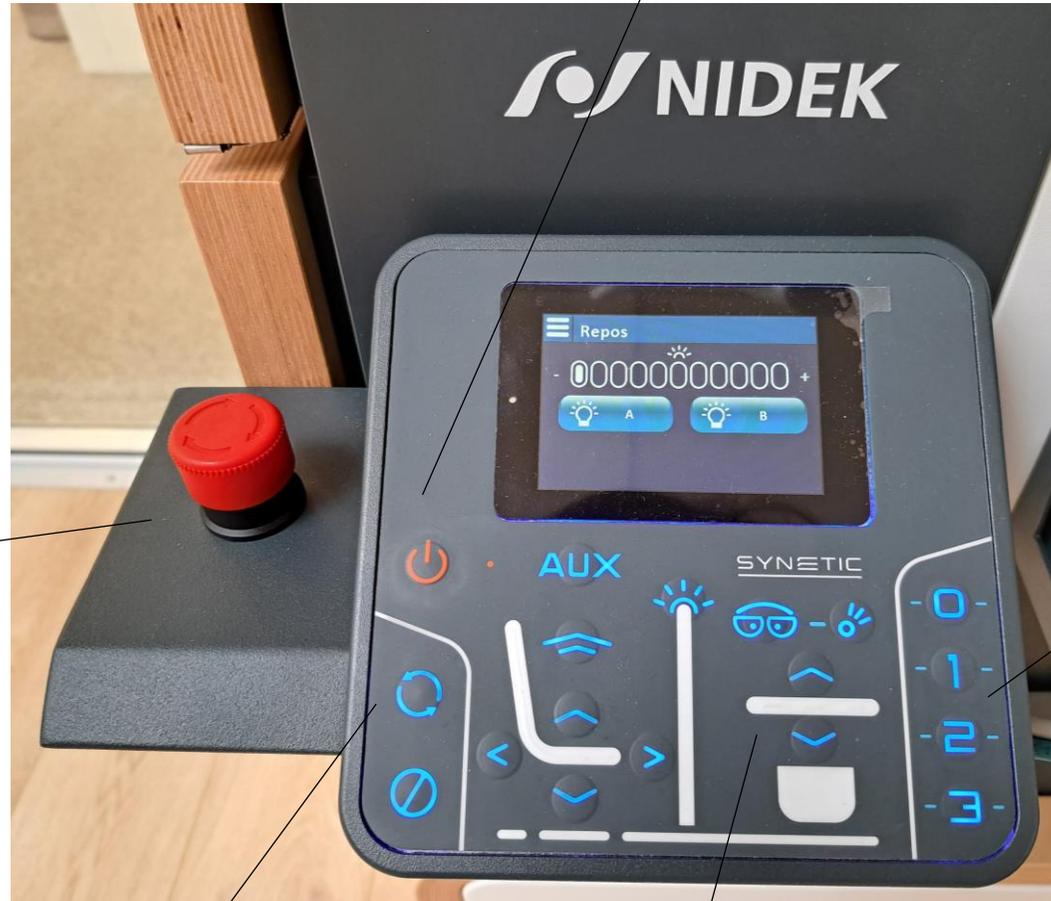

Commande position du plateau

Initialisation de la table

Réglage hauteur table

## Les principales sécurités:

### **Sécurité sortie du plateau.**

Un capteur permet l'arrêt de la translation du plateau. En cas d'anomalie, le pictogramme apparait en haut à droite de l'écran du pupitre.



Dès que le capteur ne détecte plus d'obstacles, le mouvement de translation est à nouveau autorisé et le pictogramme disparaît.



### **Sécurité montée/descente du plateau.**

En cas de contact avec les jambes du patient, un capteur permet l'arrêt de la montée du siège et de la descente du plateau. Le pictogramme apparait en haut à droite de l'écran du pupitre.



Dès que le capteur ne détecte plus d'obstacles, les mouvements « montée siège » et « descente plateau » sont à nouveau autorisés et le pictogramme disparaît.

