

# RT-6100 Guide d'utilisation simplifié

## <Vision de loin/Vision de près>

Bascule entre le test de vision de loin **Loin** et le test de vision de près **Près**.

## <Menu latéral>

**▶** Affiche le menu latéral.

## <Fenêtres secondaires 1&2 (droite/gauche)>

- Affiche les données précédemment réglées.
- Affiche les données réglées avant le préréglage précédent.

## <Zone de message de programme>

Affiche la procédure de réfraction.

## <Zone des données actuelles>

Affiche les données du verre actuellement inséré.

## <Affichage de test>

Affiche le test actuellement projeté.

## <Sélection de fonction auxiliaire>

La disponibilité dépend des tests.

- ☐** Change le contraste.
- ◼** Affiche les tests en noir et blanc inversé.
- Low** Projette les tests de nuit en utilisant la luminosité.
- ↻** Change les lettres de ligne horizontale en mode aléatoire.

## <Saisie numérique>

**+**, **-** Change la valeur sélectionnée.

## <Saisie des données>

**Entrée** Affiche l'écran de sélection des données d'importation pour les données AR ou LM.

## <Progression de programme>

- **▶** Démarre un programme de réfraction.
- **▶** Fait progresser jusqu'au prochain test tandis qu'un programme fonctionne.
- **Shift** + **▶** Ramène au test précédent.

## <Changement de fonction>

Le fait d'appuyer sur un bouton ou de tourner la molette tout en immobilisant **Shift** change les fonctions ou les pas.

## <Ouverture/fermeture de fenêtre>

**⏏**, **⏏** Couvre ou découvre la fenêtre de mesure (droite/gauche).

## <Molette>

Change la valeur sélectionnée.

## <Bouton de molette>

Change le mode sur SPH, CYL, AXIS ou AV.

## <Mode de mesure>

Sélectionne le mode pour la saisie de données et la mesure.

## <Diurne/Nocturne>

Bascule entre le test de vision diurne **☀** et le test de vision nocturne **☾**.

## <Sélection de verre auxiliaire>

**D**, **G** Affiche la fenêtre de sélection de verre auxiliaire (droit/gauche).

## <Sélection de test>

Sélectionner le test à projeter.

## <Sélection de programme>

Affiche la fenêtre de sélection de programme.

## <Enregistrement de favoris>

**★** Affiche des icônes pour les tests ajoutés comme favoris.

## <Touche d'aide>

**?** Affiche l'explication pour le test projeté.

## <Sélection de l'œil du patient>

Sélectionne l'œil droit, les deux yeux (binoculaire) ou l'œil gauche.

## <Sortie>

**Sortie** Exporte ou imprime les données.

**Shift** + **Sortie** Efface les données.

## <Commutation de cylindre croisé>

**⌂**, **⌂** Place le verre de cylindre croisé et entre en mode AXIS ou CYL.

Ce bouton est utilisé pour basculer le verre de cylindre croisé en mode AXIS ou CYL.

## <Masquage de test AV>

**⏏**, **⏏** Isole une colonne verticale. Le fait d'appuyer à nouveau sur le bouton isole sa colonne gauche ou droite.

**⏏**, **⏏** Isole une rangée horizontale.

Le fait d'appuyer à nouveau sur le bouton isole sa rangée supérieure ou inférieure.

**⏏** Isole une rangée horizontale.

**⏏** Isole une lettre unitaire.

# Menu latéral

◆ Le menu latéral affiché en appuyant sur  de l'écran de mesure permet d'exécuter des opérations autres que la mesure.

## <Fermer>

 Ferme le menu latéral.

## <ID>

Utilisé pour saisir l'identification (ID) du patient.

## <Âge>

Utilisée pour saisir l'âge du patient.

## <Liste de données>

Affiche la liste de données de mesure.

## <Zone de vision nette>

Affiche l'écran de contrôle de plage de vision nette.

## <[+], [-]>

Sélectionne un signe de relevé de cylindre entre le positif et le négatif.

## <Lamp. off>


Éteint la lampe de test, le rétro-éclairage de l'écran tactile et la lampe pour la VP. Appuyer sur n'importe quelle touche pour les allumer.

## <Lamp. Ch.>

Allume ou éteint la lampe de test.

## <A propos de l'oeil>

Affiche l'écran Liste de diagramme de réfraction.

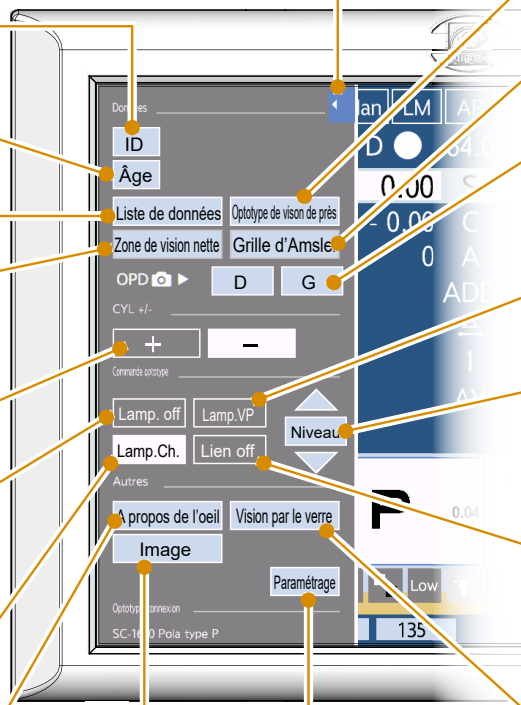

## <Optotype de vision de près>

Affiche l'écran de test de vision de près.

## <Grille d'Amsler>

Affiche l'écran Grille d'Amsler.

## <[D], [G]>

Affiche les images OPD de l'œil droit ou gauche (seulement quand les données sont importées).

## <Lamp.VP>

Allume ou éteint la lampe de point de vision de près.

## <Niveau>

Utilisées pour aligner la hauteur de test avec le niveau de l'œil du patient (seulement quand le SSC-370 est connecté).

## <Lien off>

Invalide les verres auxiliaires ou le mode (SPH, CYL, AXIS) à être automatiquement commuté quand le test est changé.

## <Vision par le verre>

Affiche l'écran d'image de vision.


## <Paramétrage>

Affiche l'écran de menu.


## <Image>

Affiche les images sauvegardées sur la carte SD.


# Enregistrement de test Favoris

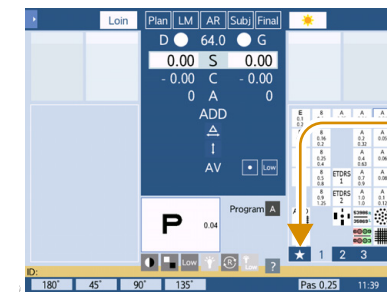

1 Appuyer sur .  
Affiche la zone Favoris (encadrement bleu).

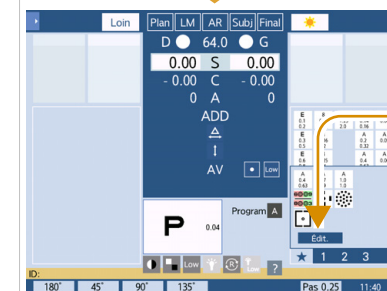


2 Appuyer sur .  
Affiche la zone Edit (encadrement vert).

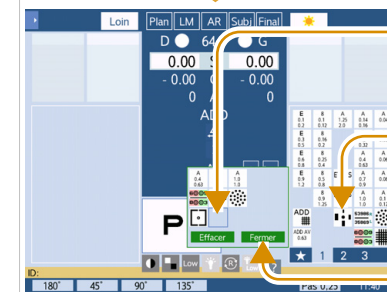

3-1 Appuyer sur la position où un test doit être placé. Un curseur est affiché.

3-2 Sélectionner l'icône du test désiré. Le test est ajouté à la position du curseur.

3-3 Appuyer sur .

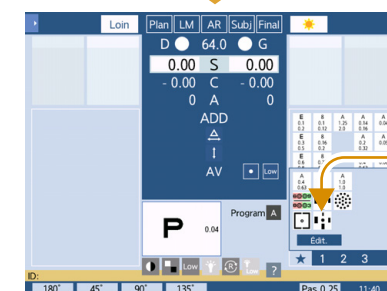

Pour effacer l'enregistrement, appuyer sur , sélectionner le test à effacer, puis appuyer sur .

4 Le test est ajouté aux favoris.